

緊急
発売

MADE IN 東大阪 with 鳥取

医療従事者に優しい設計

Incident Barrier MedicalShield

I・B・M Shield

アイ・ビー・メディカルシールド

ゆがみのないクリアなシールドのため視界を妨げることがありません。
フレームは後ろのバンドで簡単に調整できます。



特徴


- ★ 横からの飛沫を防止するために耳付近まで覆ったシールド
- ★ ゆがみのないクリアな視界
- ★ 帯電防止剤入りのため、ゴミが付着しづらいシールド
- ★ マスク、眼鏡を付けた状態でも余裕の空間を確保
- ★ 一般的なサイズS～LLまでフレームとベルトによりサイズ調整可能
- ★ 総重量50gと軽量

取扱説明書


品番 IB20204-0005
MADE IN JAPAN

各部の名称

● シールド

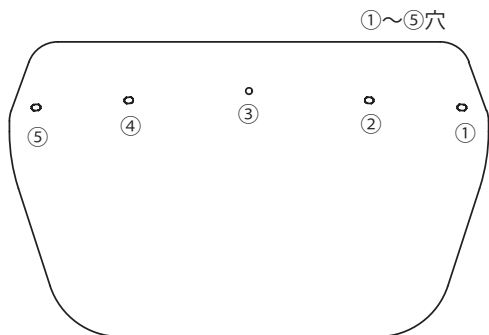


● フレーム

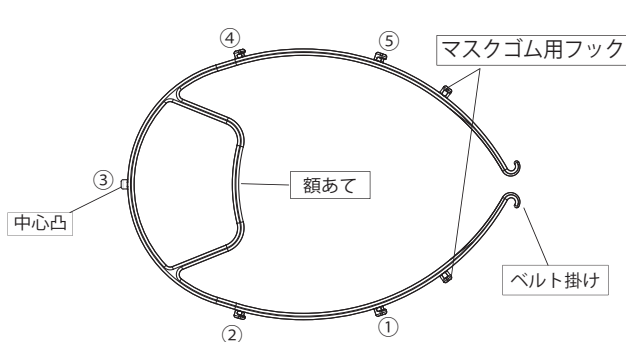

● ベルト



● パット (額あて用)

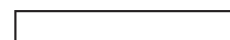

小



大



セット内容 / 販売価格

名称	サイズ mm	材質	セット入数	ケース販売価格
シールド	300×240×0.2	塩化ビニール (PVC) 帯電防止剤入	5 枚入	1袋5セット入×10 ¥37,500 (税別)
フレーム	215×146×8	ポリアセタール (POM/N/BK)	5 枚入	
ベルト	220×20×3	ポリオレフィンエラストマー	5 枚入	
パット (大・小)	小50×8×3 大50×20×3	EPT スポンジ	各5枚	

※シールドのみの販売も行っております。


シールドの取り付け方法

1. フレーム側面にあるフック①②をシールドの穴①②にはめ込みます。(中央方向にスライドさせると、中心部分③の穴がはめ込みやすくなります)
2. フレーム③の中心凸部を指でつまみながら、反対側も同じように④⑤をはめ込みます。(シールドの端を持ちながら引っ張るとはめ込みやすくなります) フレームとシールドの5箇所全てが固定された事を確認して下さい。
3. フレーム側面後部にマスクゴムを掛けるフックを設けています。必要に応じてご使用ください。

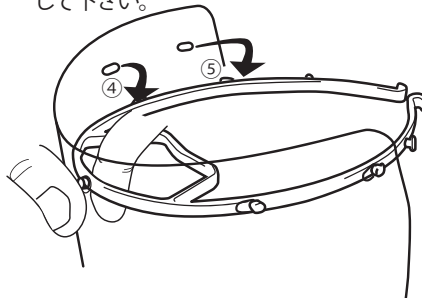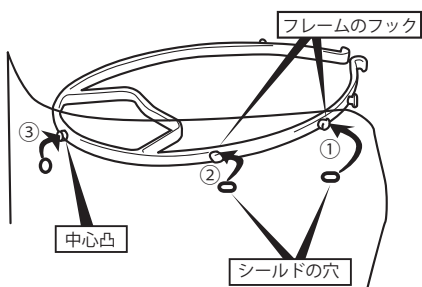


◆ 額あてにパット貼り付け方法

パットは大小2種類ある中でお好みのものをお選びください。

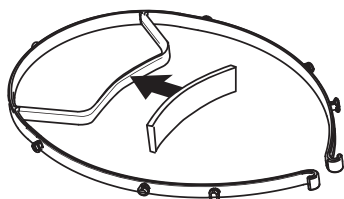


◆ ベルトの取り付け方法

ベルト掛けにベルトの穴を入れます。調整は片側5箇所の穴で調整できます。

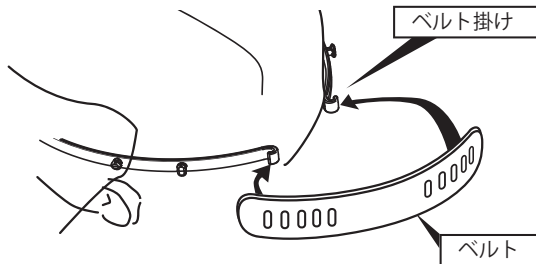

◆ 組み合わせてお使いいただけます。

眼鏡を掛けた状態でもご使用いただけます。

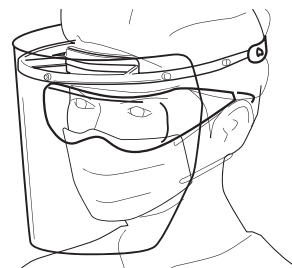

注意事項

- 1) フレーム及びシールドは使い捨て製品となります。
- 2) シールド面にキズ・汚れ等が付着すると視界がさざぐられ事故を引き起こす原因となりますので適宜新しい製品に交換してください。
- 3) 本品は、微小な粉塵や水滴等の飛沫が顔にかかることをできるだけ防ぐことを目的としています。使用者の眼や身体の損傷を防ぐものではありませんので注意してご使用ください。
- 4) 分解、改造等はしないでください。
- 5) シールドの縁 (シールドの外周の切断面) は厚さが薄いため、皮膚を傷つける等がすることがあります。注意してご使用ください。
- 6) 取外し方は、ベルトのどちらかの端を持ちながらフレームから取り外し反対側のベルト掛け部とベルトを持ちながら外します。
- 7) 交換する場合は純正品をご使用ください。

お問い合わせ

販売元  **株式会社 メディビート**
Medi Beat Inc.

〒683-8503 鳥取県米子市西町 86 番地 国立大学法人鳥取大学医学部 アレスコ棟内
TEL: 0859-36-6161 (代表) FAX 0859-36-6162 URL: <http://medibeat-inc.co.jp>

製造元  **株式会社 アイ・プロジェクト**

〒578-0965 東大阪市本庄西1丁目5番27号